

LÍQUIDO SINOVIAL

Material de Coleta

Líquido sinovial.

Preparo do paciente

Jejum não necessário.

Descrição do Exame

Líquido articular ou intra-articular. Citologia do Líquido Sinovial

Método

Estudo físico e citológico após coloração pelo Leishman. Inclui teste de mucina e pesquisa de cristais, contagem global e diferencial.

Consevação

Refrigerado 2 a 8°C: 72 horas.

Interferentes

*

Valor de Referência

Contagem global de células até 200/mm³. Neutrófilos menor que 25%. Ausência de cristais.

Interpretação

Esse exame auxilia no diagnóstico diferencial de artroses, processos inflamatórios e infecciosos, sendo particularmente útil na gota, na qual a pesquisa de cristais de urato é positiva, e na pseudogota, na qual estão presentes os cristais de pirofosfato de cálcio. A contagem global e a quantidade de neutrófilos classificam o tipo de derrame.

Setor

Hematologia