

ALDOLASE

Material de Coleta:

2,0 mL de soro

Preparo do paciente:

Para realizar o exame, o paciente não pode ter feito biópsia muscular nos últimos 30 dias, nem eletroneuromiografia nos últimos 15 dias.

Descrição do Exame:

Aldolase

Método:

Cinético U.V

Consevação:

Temperatura ambiente: 5 horas. Temperatura ambiente: 2 dias Refrigerado 2 A 8°C: 20 dias

Interferentes:

Hemólise

Valor de Referência:

Até 7,6 U/l.

Interpretação:

A determinação sérica da aldolase é de grande importância clínica na avaliação das doenças primárias da musculatura esquelética. É útil no diagnóstico e no seguimento de miopatias. Níveis muito elevados podem ser encontrados na distrofia muscular progressiva. A substância aumenta também em outras miopatias, incluindo dermatopolimiosites, e em certas hepatopatias, em neoplasias e no infarto do miocárdio.

Setor:

Bioquímica